

LA TECHNOLOGIE POUR VIVRE MIEUX



Contrôle du poids Dépendance à la nicotine Stress & Anxiété



Impuissance & Frigidité Insomnie

ACUFIRST SMART SERIES

Les SMART séries d'ACUFIRST sont une nouvelle génération d'appareils portables d'Electro Acupression fondée sur la science séculaire de la médecine chinoise et la théorie de l'énergie vitale.



Mal des transports Stimulation de la mémoire

Design Français

Comment fonctionnent les SMART séries ?

Les SMART séries associent les dernières technologies en matière d'électronique et la médecine chinoise traditionnelle. A la différence de l'acupuncture où les praticiens utilisent des aiguilles, les SMART séries émettent de très faibles impulsions électriques sur les points d'acupuncture de votre poignet.

A travers les milliers d'années de pratique de l'acupression, les praticiens chinois ont remarqué que les points situés à l'intérieur du poignet étaient l'itinéraire clé de la plupart des méridiens du corps. Lorsque la pression est correctement appliquée, ces points corrigent efficacement certains dysfonctionnements humains connus (la dépendance au tabac, les problèmes de poids, les états nauséux, l'impuissance & la frigidité, l'insomnie, le stress & l'anxiété ainsi que la perte de mémoire).

Le concept unique de cette technologie qu'est l'électro-acupression peut être effectuée par quiconque, à tout moment et aide les utilisateurs à stopper tout désordre fonctionnel.



Fonctionnement:

- En mode Horloge, appuyez sur le bouton de droite pour activer le mode thérapie. Le compte à rebours de 2 minutes démarre avec son icône clignotante. Le contrôle journalier (DCC) comptabilisant le nombre d'utilisations journalières (compteur à 2 chiffres) s'affichera ainsi que le contrôle total (TCC) comptabilisant le nombre total d'utilisation (compteur à 3 chiffres).
- Durant le mode thérapie, la fonction "booster" peut être actionnée en appuyant une nouvelle fois sur le bouton de droite. La fonction booster durera 15 secondes (lire "Précautions d'emploi") et l'icône clignotera. Ré-appuyez sur le bouton de droite pour arrêter la fonction.
- Des "bips" sonores se feront entendre à la fin de la session des 2 minutes de thérapie et l'affichage retournera automatiquement au mode horloge.
- Appuyez sur le bouton de gauche, quelque soit le mode d'affichage, pour activer le rétro-éclairage de l'écran pendant 1,5 seconde.
- Appuyez simultanément sur les boutons de droite et de gauche pendant 3 secondes pour arrêter et réinitialiser l'appareil. Appuyez sur le bouton de droite ou de gauche pour le rallumer. (Les valeurs DCC et TCC seront effacées)
- Quand les piles (2 x CR2025) seront faibles, l'icône de batterie clignotera, et ce, une semaine avant leur décharge totale. **Pour changer les piles, veuillez contacter un détaillant spécialisé (montres, électronique...) pour leurs remplacements.** Les valeurs DCC et TCC seront effacées.

Je ne sens rien quand j'active la fonction thérapie ?

Il est intentionnel et tout à fait normal de ne pas sentir quoi que ce soit. Le SMART séries a été conçu spécialement pour éviter toute gêne.

Une fonction "booster" a été ajoutée pour sentir l'effet d'intensité (voir "Précautions d'emploi"). Certaines personnes peuvent ne pas sentir l'intensité, ce qui est dû à la température du corps et/ou à l'état de la peau qui diffère d'un humain à l'autre. Les personnes ayant une peau trop sèche ou trop chaude peuvent ne pas sentir l'intensité du tout mais l'appareil fonctionne normalement.

Quand et combien de fois dois-je utiliser le SMART séries ?

Les SMART séries sont entièrement sûrs et peuvent être utilisés autant de fois que vous le désirez. Si vous vous sentez mieux et plus détendu, vous obtenez l'effet désiré.

CONTROLE DU POIDS

RHB001

La synergie des points des deux méridiens "Coeur" et "Poumon" optimise l'action du bracelet sur le contrôle de l'appétit.

Point C7: Luann

Ce point traite particulièrement les psychopathies telles que les tensions mentales, les troubles émotionnels, l'insomnie avec cauchemars, les syndromes neuroasthéniques

Point P9: Taè Luann, point lu

Ce point agit sur les spasmes de l'ossophage, les migraines et l'insomnie

Point P7: Liè Tsiuè

Ce point traite la dépression nerveuse, la fatigue, la réduction des défenses naturelles de l'organisme.

Point C5: Trong Li

Ce point traite les céphalées, l'angoisse, le trac, l'appréhension, l'émotivité et les palpitations.



(PM = Point de Masse)

Comment utiliser votre SMART séries "Contrôle du poids"

Placez le boîtier contacteur sur l'intérieur de votre poignet droit centré près de la paume de la main avec les contacteurs en contact direct avec la peau.



Le SMART séries "Contrôle du poids" stimule 4 points d'acupuncture spécifiques localisés à l'intérieur de votre poignet.

La thérapie doit être activée un minimum de 6 fois par jour pour vous aider à diminuer votre envie de manger. Activez votre SMART séries :

Toutes les heures ou deux. Avant les repas. Quand vous sentez une envie de grignotage.

Chaque séance de thérapie dure 2 minutes et s'arrête automatiquement.

Qu'est-ce que l'acupression ?



L'acupression est une technique ancestrale chinoise pour accéder et libérer les centres d'énergie bloqués ou congestionnés dans le corps afin d'équilibrer et de réguler l'énergie. Développée en Chine il y a 5000 ans, l'acupression est un composant du système holistique de la médecine traditionnelle chinoise. Ceci inclut également l'acupuncture, mais l'utilisation de l'acupuncture date d'il y a 2500 ans. L'acupression a été reconnue par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme une science activant les neurones du système nerveux qui stimule les glandes endocrines et active les organes défectueux. La technique de pression permet de débloquent l'obstruction afin que l'énergie puisse circuler avec régularité pour que les organes puissent fonctionner normalement à nouveau. L'acupression est sans danger pour tout adulte en bonne santé. La supervision des parents est recommandée pour les personnes de moins de 16 ans.

MODE D'EMPLOI

- En mode sommeil, appuyez sur le bouton de droite ou de gauche pendant 2 secondes pour mettre l'appareil en marche qu'il affichera 12:00 AM 1st January 2012.
- En mode horloge, appuyez et maintenez enfoncée le bouton de gauche jusqu'à ce que "1année" clignote. Appuyez sur le bouton de droite pour modifier l'année.
- Appuyez sur le bouton de gauche pour passer au mode "mois". Appuyez sur le bouton de droite pour modifier le mois.
- Idem pour le réglage des jours.
- Idem pour le réglage des heures et ensuite des minutes.
- Idem pour le mode 12/24 heures.
- Idem pour le langage: Anglais (EN), Espagnol (ES), Français (FR) & Allemand (DE). Le langage par défaut est l'Anglais.
- Appuyez longuement sur le bouton de gauche pour sauvegarder les réglages et revenir sur le mode horloge.

Remarque: S'il n'y a aucune action pendant 10 secondes, les valeurs seront enregistrées et l'affichage reviendra au mode horloge.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le SMART séries ?

Le SMART séries est un appareil individuel portable muni d'une puce électronique qui envoie de faibles impulsions électriques à travers ses contacteurs. Les impulsions stimulent les points d'acupuncture spécifiques qui sont situés à l'intérieur du poignet.

Sur la base de la science séculaire chinoise et de la théorie de l'énergie vitale, le SMART séries aide à réguler l'équilibre du corps humain.

Comment utiliser mon SMART séries ?

Le SMART séries doit être ajusté pour s'adapter à l'intérieur du poignet droit, centré près de la paume de la main avec les contacteurs en contact direct avec la peau. Activez la thérapie en appuyant sur le bouton du côté droit de l'appareil. Le processus durera pendant 2 minutes et s'arrêtera automatiquement.

En utilisant le SMART séries régulièrement un minimum de 6 fois par jour, vous constaterez les premiers résultats dans 3 à 4 semaines. Pour des résultats plus rapides, vous pouvez activer l'appareil aussi souvent que vous en ressentez le besoin.

Précautions d'emploi

Un point d'acupuncture est une entité énergétique relativement fragile. La détection électrique perturbe le point qui a besoin d'un temps de latence pour agir et peut se traduire par un résultat thérapeutique médiocre. Il est donc fortement conseillé d'utiliser la fonction "booster" avec modération.

Le SMART séries est entièrement sûr et inoffensif pour la santé, sans effets secondaires mais il ne doit pas être utilisé par:

- Les femmes enceintes
- Les personnes portant un stimulateur cardiaque (pacemaker)
- Les personnes sous dialyse
- Les enfants en-dessous de 13 ans



DEPENDANCE A LA NICOTINE

RHB002

La synergie des points des deux méridiens "Coeur" et "Poumon" optimise l'action du bracelet sur le sevrage tabagique.

Point C7: Luann

Ce point traite particulièrement les angoisses, la peur, le manque de confiance en soi, l'émotivité.

Point P9: Taè Luann, point lu

C'est le point tonifiant du poumon. Il tonifie les insuffisances fonctionnelles du poumon dans l'asthme, l'emphysème, la toux, les sécrétions, les expectorations muco-purulentes et l'hémoptysie.



(PM= Point de Masse)

Comment utiliser votre SMART séries "Dépendance à la nicotine":

Placez le boîtier contacteur sur l'intérieur de votre poignet droit centré près de la paume de la main avec les contacteurs en contact direct avec la peau.



Le SMART séries "Anti-Tabac" stimule 3 points d'acupuncture spécifiques localisés à l'intérieur de votre poignet.

La thérapie doit être activée un minimum de 6 fois par jour pour vous aider à diminuer votre envie de fumer. Activez votre SMART séries :

Toutes les heures ou deux.

Au réveil.

Quand vous sentez l'envie de fumer une cigarette.

Chaque séance de thérapie dure 2 minutes et s'arrête automatiquement.

STRESS & ANXIÉTÉ

RHB003



(PM = Point de Masse)

La synergie des points des trois méridiens "Poumon", "Cœur" et "Maître du Cœur" optimise l'action du bracelet sur le stress et l'anxiété.

Point C7: Luann

Ce point traite les angoisses, la peur, le manque de confiance en soi, l'émotivité, les insomnies, les syndromes neurasthéniques et les palpitations nerveuses.

Point CS7 ou MH7: Ta Ling, point lu

Ce point agit pour l'érythème cardiaque, les palpitations avec angoisse, les cardialgies, dans les agitations avec anxiété. Il a une action sédative sur le psychisme, sur la fatigue, chez les malades cyclothymiques riant ou pleurant sans raison.

Point P9: Taè Luann, point lu

C'est le point tonifiant du poumon. Il tonifie la circulation sanguine, régularise le rythme cardiaque et agit sur les artères. les migraines, les névralgies et l'insomnie.

Point C5: Trong Li

Ce point traite les céphalées, l'angoisse, le trac, l'appréhension, l'émotivité et les palpitations.

Comment utiliser votre SMART séries "Impuissance & Frigidité":

Placez le boîtier contacteur sur l'intérieur de votre poignet droit centré près de la paume de la main avec les contacteurs en contact direct avec la peau.



Le SMART séries "Impotence et Frigidité" stimule 2 points d'acupuncture spécifiques localisés à l'intérieur de votre poignet.

La thérapie doit être activée un minimum de 6 fois par jour pour vous aider à recouvrer votre libido. Activez votre SMART séries :

Toutes les heures ou deux.

Au réveil et avant d'aller vous coucher.

Chaque séance de thérapie dure 2 minutes et s'arrête automatiquement.

IMPUISSANCE & FRIGIDITÉ

RHB004



(PM = Point de Masse)

La synergie des points des deux méridiens "Cœur" et "Maître du Cœur" optimise l'action du bracelet sur le dysfonctionnement sexuel

Point C7: Luann

Ce point traite les psychasthénies, les angoisses, la peur, le manque de confiance en soi, l'émotivité, les insomnies, les syndromes neurasthéniques et les palpitations nerveuses.

Point MC6 ou CS6: Nei Koann

Ce point agit pour les angoisses, l'anxiété, l'émotivité avec dépression, bégaiement émotif, faiblesse de la mémoire, cauchemars, dépression mentale, manque d'attention, de confiance en soi, manque d'audace, timidité, tristesse.

Le méridien MC ou CS équilibre également la sexualité dont il domine tous les troubles (associabilité avec le conjoint, inversion sexuelle,...)

Comment utiliser votre SMART séries "Stress & Anxiété":

Placez le boîtier contacteur sur l'intérieur de votre poignet droit centré près de la paume de la main avec les contacteurs en contact direct avec la peau.



Le SMART séries "Stress et Anxiété" stimule 4 points d'acupuncture spécifiques localisés à l'intérieur de votre poignet.

La thérapie doit être activée un minimum de 6 fois par jour pour vous aider à diminuer votre stress et anxiété. Activez votre SMART séries :

Toutes les heures ou deux.

Au réveil et avant d'aller vous coucher.

Quand vous vous sentez stressé ou anxieux.

Chaque séance de thérapie dure 2 minutes et s'arrête automatiquement.

INSOMNIE

RHB005



(PM = Point de Masse)

La synergie des points des trois méridiens "Cœur", "Maître du Cœur" et "Poumon" optimise l'action du bracelet sur l'insomnie.

Point C7: Luann

Ce point traite les psychopathies, les psychasthénies, les angoisses, la peur, le manque de confiance en soi, l'émotivité, les insomnies, les syndromes neurasthéniques.

Point P9: Taè Luann, point lu

Ce point agit pour les migraines, les névralgies, l'insomnie chez les sujets ayant du mal à trouver le sommeil.

Point MC6 ou CS6: Nei Koann

Ce point agit pour les angoisses, l'anxiété, l'émotivité, la dépression, le bégaiement émotif, les terreurs nocturnes, les cauchemars, l'indécision, le manque d'attention, de confiance en soi, le manque d'audace, la timidité, la tristesse.

Point C5: Trong Li

Ce point traite l'angoisse, le trac, l'appréhension, l'émotivité.

Point C6: Inn Tsi

Ce point traite les sueurs nocturnes, les palpitations, l'angoisse avec peur.

Comment utiliser votre SMART séries "Insomnie":

Placez le boîtier contacteur sur l'intérieur de votre poignet droit centré près de la paume de la main avec les contacteurs en contact direct avec la peau.



Le SMART séries "Insomnie" stimule 5 points d'acupuncture spécifiques localisés à l'intérieur de votre poignet.

La thérapie doit être activée un minimum de 6 fois par jour pour vous aider à retrouver votre sommeil. Activez votre SMART séries :

Toutes les heures ou deux.

Avant d'aller vous coucher.

Pendant les insomnies.

Chaque séance de thérapie dure 2 minutes et s'arrête automatiquement.

MAL DES TRANSPORTS

RHB006



(PM = Point de Masse)

La synergie des points des deux méridiens "Poumon" et "Maître du Cœur" optimise l'action du bracelet sur le mal des transports.

Point P9: Taè Luann, point lu

C'est le point tonifiant du poumon. Il tonifie toutes les insuffisances fonctionnelles du poumon.

Point MC6 ou CS6: Nei Koann

Point électif des maladies gastriques, vésiculaires, spléniques et cardiaques.

Il agit pour les angoisses, l'anxiété, l'émotivité, le bégaiement émotif, l'indécision, le manque d'attention, de confiance en soi, le manque d'audace, la timidité, la tristesse.

Comment utiliser votre SMART séries "Mal des Transports":

Placez le boîtier contacteur sur l'intérieur de votre poignet droit centré près de la paume de la main avec les contacteurs en contact direct avec la peau.



Le SMART séries "Mal des Transports" stimule 2 points d'acupuncture spécifiques localisés à l'intérieur de votre poignet pour vous aider contre l'état nauséux du mal de l'air, de mer et de la voiture.

Activez la thérapie plusieurs fois de suite :

Une heure avant d'embarquer un avion, un bateau ou une voiture.

A bord d'un avion, d'un bateau ou d'une voiture et chaque fois que vous vous sentez mal.

Chaque séance de thérapie dure 2 minutes et s'arrête automatiquement.

STIMULATION DE LA MÉMOIRE

RHB007



(PM = Point de Masse)

La synergie des points des trois méridiens "Poumon", "Cœur" et "Maître du Cœur" optimise l'action du bracelet sur la perte de la mémoire.

Point C7: Luann

Ce point traite particulièrement les psychopathies, les psychasthénies, les angoisses, la peur, le manque de confiance en soi, l'émotivité, les insomnies, les syndromes neurasthéniques. Il traite également les palpitations nerveuses.

Point P9: Taè Luann, point lu

C'est le point tonifiant du poumon. Il tonifie la circulation générale. Il agit également sur les migraines.

Point MC6 ou CS6: Nei Koann

Ce point agit sur les angoisses, l'anxiété, l'émotivité, le bégaiement émotif, la baisse de mémoire, les terreurs nocturnes, l'indécision, le manque d'attention, de confiance en soi, le manque d'audace, la timidité, la tristesse.

Comment utiliser votre SMART séries "Mémoire":

Placez le boîtier contacteur sur l'intérieur de votre poignet droit centré près de la paume de la main avec les contacteurs en contact direct avec la peau.



Le SMART séries "Mémoire" stimule 3 points d'acupuncture spécifiques localisés à l'intérieur de votre poignet pour dynamiser l'esprit et stimuler la mémoire

La thérapie doit être activée un minimum de 6 fois par jour pour vous aider à consolider votre mémoire. Activez votre SMART séries :

Toutes les heures ou deux.

Chaque séance de thérapie dure 2 minutes et s'arrête automatiquement.

Je suis un fervent défenseur de la Médecine Traditionnelle Chinoise (TCM) et j'ai décidé, il ya quelques années de créer des produits qui aident les gens à mieux vivre.

Aussi, nous testons l'efficacité de tous les produits que nous développons avant leur commercialisation et un jour ou j'étais extrêmement stressé par mes soucis qui m'empêchaient de dormir, j'ai personnellement testé l'un après l'autre, les modèles "Stress & Anxiété" et "Insomnie" pendant une semaine en rentrant chez moi le soir.

Depuis lors, je contrôle parfaitement mon stress et je dors très bien.

Je recommande fortement les appareils SMART séries.



Hugues Vincendeau
Managing Director
Acufirst

Attestation pour les produits "ACUFIRST"

Je, Dr Michel Le Faou, confirme avoir réalisé des études cliniques sur les produits SMART séries d'ACUFIRST et garantis que ces produits sont sans danger pour la santé et qu'il n'ont aucun effet secondaire indésirable.



Dr Michel LE FAOU

Lauréat de la Faculté de Médecine Paris VII,
Lauréat de l'Académie Nationale de Médecine,
Président-Associé au service de Médecine Physique à l'HÔPITALIQUET - (PARIS)
Vice-président de la S.M.C. (Société Médicale d'Acupuncture Chinoise)
Président de l'ACCOOL (Association pour l'Enseignement Continué en Médecine Manuelle-Ostéopathe et Médecine Naturelle)
Président de l'AM (Green Medicine International), l'acte humanitaire par la Médecine Naturelle.



Pour toute information concernant les produits SMART Series ou les autres produits Acufirst, visitez la page: <http://www.acu-first.com>

